

Instrukcja pobrania materiału - wymazu z błony śluzowej policzka

1/ założyć jednorazową rękawiczkę na prawą dłoń (w przypadku osoby leworęcznej na lewą dłoń),

2/ odkręcić korek plastikowego pojemnika / osłonki / z wymazówką, wyciągnąć wymazówkę z osłonki i nie dotykając palcami końcówki z wacikiem chwycić biały patyczek wymazówki dłonią z rękawiczką w połowie odległości między wacikiem a korkiem,

3/ umieścić wymazówkę (wacik) w jamie ustnej odchylając nieco policzki przy użyciu drugiej ręki,

4/ przyłożyć końcówkę wymazówki z wacikiem do błony śluzowej policzka /wewnątrz jamy ustnej/,

5/ przez kilkanaście sekund energicznie pocierać końcówką wymazówki z wacikiem o błonę śluzową policzka po stronie lewej a następnie po stronie prawej (dla lepszego pobrania materiału można w palcach obracać wymazówkę),

6/ wymazówkę z pobranym materiałem umieścić z powrotem w plastikowej przejrzystej osłonce / pojemniku / nie zamykając korka wymazówki (należy zachować ostrożność i nie dotykać wacikiem zewnętrznej ścianki osłonki wymazówki),

Prosimy powtórzyć powyższe czynności z drugą załączoną wymazówką / 2x dla matki, 2x dla ojca, 2x dla dziecka /.

7/ pozostawić otwarte plastikowe pojemniki z wymazówkami przez kilkanaście godzin w celu podsuszenia pobranego materiału,

8/ po kilkunastu godzinach docisnąć korki wymazówek do osłonek zamykając szczelnie pojemniki,

9/ opisać etykiety pojemników imieniem i nazwiskiem osoby, od której pobrano materiał,

10/ umieścić pojemniki z pobranym materiałem w załączonej kopercie zwrotnej oraz wypełnioną i podpisaną kartę zlecenia i odesłać na adres NZOZ Meditest Diagnostyka Medyczna, ul. Bronisławy 14 D, 71-533 Szczecin priorytetową przesyłką poleconą.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub trudności z pobraniem materiału prosimy o kontakt pod nr tel. **602 64 69 42**.